

Návod k použití Vážený zákazník

e nové sprchové křeslo nabízí speciální funkčnost a pohodlí. Snadno a pohodlně se osprchujete.

Přečtěte si tuto příručku o struktuře a použití. Tento návod uschovejte pro budoucí použití. Pokud zasíláte produkt dále, uveďte také tohoto průvodce. Výrobce a dovozce nejsou zodpovědní za nesprávné použití výrobku nebo nedodržení pokynů v návodu k obsluze.

Účel použití

Tato židle slouží jako sedací nábytek pro lidi se sníženou pohyblivostí při sprchování. Na vnitřní, soukromé použití, nikoliv pro průmyslové použití.

Bezpečnostní informace

- Balení uchovávejte mimo dosah dětí (nebezpečí udušení).
- Nedovolte dětem, aby se s židličkou hráli nebo na ni stoupaly, aby nedošlo k pádu.
- Nezapomeňte pomoci uživateli při sezení nebo vstávání.
- Nenoste lidi, kteří sedí na židli a drží se za rukojeti. Výrobek se může rozbít a způsobit zranění.
- Nosnost: max. 150 kg.
- Před použitím zkontrolujte, zda je židle stabilní. Ujistěte se, že v sprchové kabině a před ní je protiskluzová podložka, aby nedošlo ke zranění.
- Každý měsíc kontrolujte stabilitu židle a správně namontované šrouby a spojení. V případě potřeby dotáhněte šrouby.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky.
- Výrobek neupravujte ani neopravujte. Náhradní díly nakupujte pouze u specializovaného prodejce.
- Nejsme zodpovědní za jakékoliv poškození sprchové vaničky.
- Sedněte si vzpřímeně na židli, nestůjte. (Riziko zranění).

Návod k použití Vážený zákazník

e nové sprchové křeslo nabízí speciální funkčnost a pohodlí. Snadno a pohodlně se osprchujete.

Přečtěte si tuto příručku o struktuře a použití. Tento návod uschovejte pro budoucí použití. Pokud zasíláte produkt dále, uveďte také tohoto průvodce. Výrobce a dovozce nejsou zodpovědní za nesprávné použití výrobku nebo nedodržení pokynů v návodu k obsluze.

Účel použití





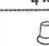
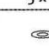
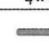
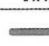
Tato židle slouží jako sedací nábytek pro lidi se sníženou pohyblivostí při sprchování. Na vnitřní, soukromé použití, nikoliv pro průmyslové použití.

Bezpečnostní informace


- Balení uchovávejte mimo dosah dětí (nebezpečí udušení).
- Nedovolte dětem, aby se s židličkou hráli nebo na ni stoupaly, aby nedošlo k pádu.
- Nezapomeňte pomoci uživateli při sezení nebo vstávání.
- Nenoste lidi, kteří sedí na židli a drží se za rukojeti. Výrobek se může rozbít a způsobit zranění.
- Nosnost: max. 150 kg.
- Před použitím zkontrolujte, zda je židle stabilní. Ujistěte se, že v sprchové kabině a před ní je protiskluzová podložka, aby nedošlo ke zranění.
- Každý měsíc kontrolujte stabilitu židle a správně namontované šrouby a spojení. V případě potřeby dotáhněte šrouby.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky.
- Výrobek neupravujte ani neopravujte. Náhradní díly nakupujte pouze u specializovaného prodejce.
- Nejsme zodpovědní za jakékoliv poškození sprchové vaničky.
- Sedněte si vzpřímeně na židli, nestůjte. (Riziko zranění).

- Plastové prvky si zachovávají svou kvalitu až 5 let.
- Nepoužívejte výrobek, pokud jsou na něm viditelné nebo předpokládané chyby.

Seznam náhradních dílů a velikost balení

1 x A	1 x B	1 x C	4 x D
			
sedací část	Alu-rám	Alu-rám	Teleskopická noha
4 x E	5 x F	4 x G	1 x H
			
guma	podložka	okružlý šrób (M6 x 35 mm)	okružlý šrób (M6 x 40 mm)

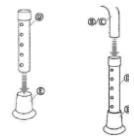Struktura



1. obr

2. obr

gumové nožičky (E) položte na 4 teleskopické nožičky (D), viz obrázek 1.


Připejte teleskopické nohy ke dvěma hliníkovým rámem (B) + (C), viz obrázek 2.

obr

Hliníkové rámy (B) + (C)
zajistěte šroubkami (G) +
(H) a jednu podložku (F) až po
sedlo (A), pozri obrázek 3.

technické údaje

Miery :	540 x 470 x 370 - 550 mm
Sedací část:	475 x 300 mm
Nataviteľná výška:	350 - 520 mm
Váha:	1800 g
Nosnosť:	150 kg

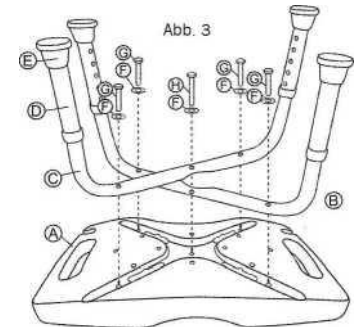









4. obr

Likvidace

Obalový materiál musí být odborně předán společnosti na zpracování odpadu nebo zařízení na zpracování komunálního odpadu a může být zlikvidován jako tříděný odpad v souladu s platnými předpisy. V případě pochybností se obraťte na místní úřad pro životní prostředí.

- Plastové prvky si zachovávají svou kvalitu až 5 let.
- Nepoužívejte výrobek, pokud jsou na něm viditelné nebo předpokládané chyby.

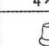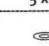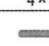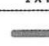Seznam náhradních dílů a velikost balení

1 x A	1 x B	1 x C	4 x D
			
sedací část	Alu-rám	Alu-rám	Teleskopická noha
4 x E	5 x F	4 x G	1 x H
			
guma	podložka	okružlý šrób (M6 x 35 mm)	okružlý šrób (M6 x 40 mm)

Struktura



1. obr

2. obr

gumové nožičky (E) položte na 4 teleskopické nožičky (D), viz obrázek 1.


Připejte teleskopické nohy ke dvěma hliníkovým rámem (B) + (C), viz obrázek 2.

obr

Hliníkové rámy (B) + (C)
zajistěte šroubkami (G) +
(H) a jednu podložku (F) až po
sedlo (A), pozri obrázek 3.

technické údaje

Miery :	540 x 470 x 370 - 550 mm
Sedací část:	475 x 300 mm
Nataviteľná výška:	350 - 520 mm
Váha:	1800 g
Nosnosť:	150 kg

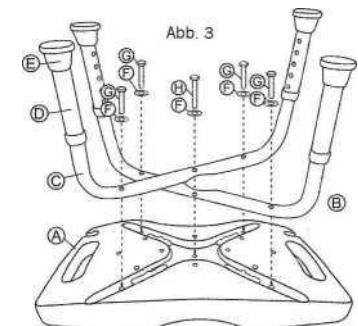

4. obr

Likvidace

Obalový materiál musí být odborně předán společnosti na zpracování odpadu nebo zařízení na zpracování komunálního odpadu a může být zlikvidován jako tříděný odpad v souladu s platnými předpisy. V případě pochybností se obraťte na místní úřad pro životní prostředí.