

Fülzsíreltávolító fecskendő - 25819

## **ODSTRAŇOVAČ UŠNÍHO MAZU "STRÍKAČKA", ČÍSLO VÝROBKU 013930**

Z hygienických důvodů a pro zajištění co nejdelší životnosti spotřebiče se doporučuje, aby byl po použití uložen v obalu.

1 Otvor pro silikonovou hlavu    2 Posuvník    3 Silikonová hlava    4 Použití

Tento čistič uší ve tvaru stříkačky je ideální pro hygienické, praktické a pohodlné čištění zvukovodů.

Nehrozí, že by se ušní maz dostal hlouběji do zvukovodu. Třístranná tryska dosáhne k bočním stěnám čištěného ucha, nikoli přímo k ušnímu bubínku. Díky tomu mohou usazeniny, vosk a kapalina snadno odtékat. Pro bezbolestné a bezpečné čištění uší pro děti i dospělé!

Objem 20 ml. Dodává se se 3 silikonovými hroty.

### **UPOZORNĚNÍ:**

- Před každým použitím a po něm čistič uší vyčistěte.
- Nevhodné pro děti do 3 let.
- Pokud pocítíte bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte přípravek používat.
- Nepoužívejte čistič uší, pokud máte poškozený bubínek, krvácíte nebo máte ucpaný zvukovod nebo vás bolí ucho.
- Pokud dojde k podráždění kůže, přestaňte přípravek používat a poraďte se s ušním lékařem nebo dermatologem.

### **NÁVOD K POUŽITÍ:**

1. Nasadte silikonovou špičku na hlaveň stříkačky tak, aby byla bezpečně na svém místě.
2. Zatlačte jezdec do injekční stříkačky, dokud nedojde k jeho nárazu.
3. Podržte silikonovou hlavici v misce s teplou vodou (nejlépe tělesné teploty) a vytáhněte jezdec, abyste naplnili stříkačku.
4. Posadte se a nakloněte hlavu na stranu, kterou chcete ucho čistit, dolů. Pod ucho umístěte misku na zachycení přebytečné vody. Pomalu zasuňte jezdec do otvoru.
5. V případě potřeby tento postup několikrát zopakujte.

### **ČIŠTĚNÍ:**

- Po každém použití umyjte čistič uší teplou mýdlovou vodou, opláchněte teplou vodou a nechte uschnout.
- Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.

