

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### Kedves vevőnk

Az Ön új zuhanyszéke különleges funkcionalitást és a használatról szól. Az útmutatót őrizze meg a későbbi felhasználáshoz. Ha a terméket továbbadja, kérjük, adja át ezt az útmutatót is. A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget a termék szakszerűtlen használatáért vagy a kezelési útmutató figyelmen kívül hagyásáért.

Olvassa el ezt az útmutatót, amely a felépítésről és a használatról szól. Az útmutatót őrizze meg a későbbi felhasználáshoz. Ha a terméket továbbadja, kérjük, adja át ezt az útmutatót is. A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget a termék szakszerűtlen használatáért vagy a kezelési útmutató figyelmen kívül hagyásáért.

### Felhasználás célja

Ez a szék ülóbütorként szolgál a mozgáskorlátozott emberek részére zuhanyozás közben. A benti, magáncélú felhasználásra szolgál, ipari használatra nem.

### Biztonsági tudnivalók

- A csomagolóanyag ne kerüljön gyermekek kezébe (fulladásveszély).
- Ne hagyja, hogy a gyermekek a székekkel játszanak vagy arra felmásszanak, a leesés elkerülésére.
- Ügyeljen arra, hogy a használatkor leüléskor vagy a felálláskor segítsenek.
- Ne vigyenek személyeket a székre ülve és a fogantyúkba kapaszkodva. A termék eltörhet és sérüléseket okozhat.
- Teherbírás: max. 150 kg.
- A használat előtt ellenőrizze a szék stabil állását. Ügyeljen arra, hogy a zuhanyfülkében és előtte csúszásbiztos alátét legyen a sérülések elkerülésére.
- Minden hónapban ellenőrizze a szék stabilitását és a megfelelően illeszkedő csavarokat és összekötéseket. Szükség esetén húzza meg a csavarokat.
- Ne használjon súrolószereket.
- Ne módosítsa vagy javítsa a terméket. A pótalkatrészeket csak szakkereskedésben vásárolja meg.
- Nem felelünk a zuhanytálcában keletkező károkért.
- A széken egyenes helyzetben üljön, ne álljon. (sérülésveszély).

- A műanyag elemek maximum 5 évig őrzik meg minőségüket.
- Látható vagy vélt hibák esetén ne használja a terméket.

### Alkatrészlista és a csomag tartalma

1 x A	1 x B	1 x C	4 x D
ülőrész	Alu-keret	Alu-keret	Teleszkópos láb
4 x E	5 x F	4 x G	1 x H
gumitalp	alátét	kerek csavar (M6 x 35 mm)	kerek csavar (M6 x 40 mm)

### Felépítés



1. ábra



2. ábra


Helyezze a gumitalpakat (E) a 4 teleszkópos lábra (D), lásd az 1. ábrát.

Kösse össze a teleszkópos lábakat a két alukerettel (B) +(C), lásd a 2. ábrát.

Az alukereteket (B) + (C) rögzítse a csavarokkal (G) + (H) és egy-egy alátéttel (F) lent az ülőrészhez (A), lásd a 3. ábrát.

### Műszaki adatok

Méretek (Ho x Szé x Ma):	540 x 470 x 370 - 550 mm
Ülőfelület:	475 x 300 mm
Állítható magasság:	350 - 520 mm
Szék súlya:	1800 g
Maximális terhelés:	150 kg

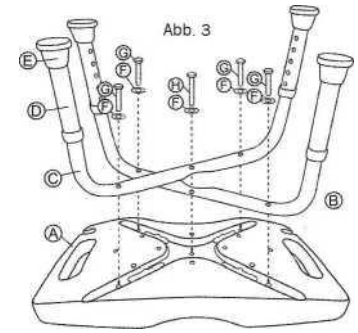

A teleszkópos láb (D) zárófejét nyomja befele és állítsa be a lábat a kívánt magasságra. Ezután kattintsa be a zárófejet a megfelelő lyukba.



4. ábra

Minden lábat állítson be erre a magasságra, hogy a szék ne billegjen. A plusz stabilitásért a gumitalpakat (E) úgy forgassa el, hogy azok a zuhanytálcához letapadjanak lásd a 4. ábrát.

### Ártalmatlanítás

A csomagolóanyagot szakszerűen át kell adni hulladék-feldolgozó cégnek vagy kommunális hulladék-feldolgozó üzemnek esetleg szétválogatott hulladékként az aktuális előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell. Kétség esetén kérdezzen rá a helyi környezetvédelmi hatóságnál.