

# SCAUN PENTRU DUȘ

## INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

### Stimați clienți!

Scaunul dumneavoastră de duș vă oferă confort. Următoarele instrucțiuni sunt foarte importante! Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile, urmați-le întocmai, și păstrați-le, pentru a le putea consulta ori de câte ori este nevoie. Pentru a evita daunele materiale și vătămările corporale, respectați indicațiile de folosire și de siguranță. Dacă înstrăinați produsul terților, neapărat înmânați și instrucțiunile de folosire! Producătorul și distribuitorul nu-și asumă răspunderea pentru daunele provenite din nerespectarea instrucțiunilor de folosire, a utilizării care nu este în conformitate cu destinația, a reparațiilor necorespunzătoare, a modificărilor neaprobate sau utilizarea pieselor de schimb neaprobate.

### Scopul utilizării


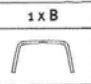
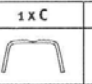
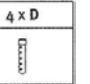
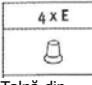
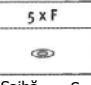
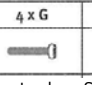
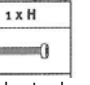
Acest scaun servește ca mobilier de ședere pentru persoanele cu mobilitate redusă în timpul dușului. Pentru uz casnic, privat, nu pentru uz industrial.

### Informații de siguranță

- Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor (risc de sufocare).
- Pentru a evita căderea, nu permiteți copiilor să se joace sau să se urce pe scaun.
- Aveți grijă să ajutați utilizatorul atunci când se așează sau se ridică.
- Nu purtați persoane așezate pe scaun ținând mânerul. Produsul se poate rupe și poate provoca răni.
- Sarcină maximă: 150 kg.
- Verificați dacă scaunul este stabil înainte de utilizare. Asigurați-vă că există și un covor antiderapant în interiorul și în fața cabinei de duș pentru a preveni rănirea.
- În fiecare lună verificați stabilitatea scaunului, a șuruburilor și conexiunilor să fie montate corespunzător. Strângeți șuruburile dacă este necesar.
- Nu folosiți substanțe chimice, bureți metalici, etc.
- Nu modificați și nu reparați produsul. Cumpărați piese de schimb numai de la un comerciant cu amănuntul specializat.
- Nu suntem răspunzători pentru orice deteriorare a cabinei de duș.
- Stați drept pe scaun, nu stați în picioare (risc de rănire).

- Elementele din plastic își păstrează calitatea până la 5 ani.
- Nu utilizați produsul dacă există defecte vizibile sau suspectate.

### Componente și conținut colet

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 x A   | 1 x B   | 1 x C   | 4 x D  |
|  |  |  |  |
| Șezut   | Cadru aluminiu  | Cadru aluminiu  | Picioare telescopice   |
| 4 x E   | 5 x F   | 4 x G   | 1 x H  |
|  |  |  |  |
| Talpă din cauciuc   | Șaibă   | Șurub rotund (M6 x 35 mm)   | Șurub rotund (M6 x 40 mm)  |

### Montarea

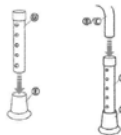


Fig. 1

Așezați tălpile din cauciuc (E) pe cele 4 picioare telescopice (D), vezi Figura 1.

Conectați picioarele telescopice la cele două cadre din aluminiu (B) + (C), vezi Figura 2.

Fig. 2

Fixați cadrele din aluminiu (B) + (C) pe scaun (A) cu șuruburile (G) + (H) și cu câte o șaibă (F) a se vedea Figura 3.

### Date tehnice

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Dimensiuni (L x l x Î): | 540 x 470 x 370 - 550 mm |
| Suprafață scaun/șezut:  | 475 x 300 mm             |
| Înălțime reglabilă:     | 350 - 520 mm             |
| Greutate:               | 1800 g                   |
| Sarcină maximă:         | 150 kg                   |

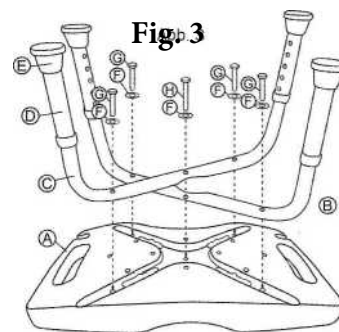


Fig. 3



Fig. 4

Împingeți spre interior capul de închidere al piciorului telescopic (D) și reglați piciorul la înălțimea dorită. Apoi faceți clic pe capul de blocare în orificiul corespunzător.

Reglați toate picioarele la aceeași înălțime, astfel încât scaunul să nu se încline. Pentru o stabilitate suplimentară, rotiți picioarele de cauciuc (E) astfel încât acestea să se lipească de tava de duș, consultați Figura 4.

### Reciclarea

Vă rugăm să aruncați ambalajul în locațiile desemnate în conformitate cu reglementările actuale. Dacă nu sunteți sigur unde și cum să aruncați produsul, vă rugăm să contactați autoritățile locale.



MediaShop GmbH  
RO: 32948394  
OP 2 Oradea, CP 2  
Jud Bihor, Cod poștal 410670  
Telefon 318.114.000  
informatii@mediashop.tv