

Corector pentru degetul mare de la picior, 017570/1/2

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Dispozitivele de corecție a degetelor ajută la regresia camelor/monturilor inflamatorii la articulația degetului mare, aplicând o ușoară presiune de restaurare. Setul include un dispozitiv de corecție care se potrivește pe piciorul stâng și drept (marcare pe fiecare piesă: L = stânga și R = dreapta). Dispozitivele de corecție a degetelor sunt proiectate pentru a permite utilizatorului să stea sau să doarmă în timpul tratamentului.



Mod de utilizare (Purtare): selectați corectorul pentru degetul de la piciorul stâng (L) sau drept (R) și plasați exact partea îndoită la capăt în interiorul degetului mare. Glisați cureaua largă din spumă înainte sau înapoi, astfel încât să fie chiar deasupra camei/montului. Apoi potriviți cureaua cu velcro pe șinele albe din plastic și fixați-le. Contrapresiunea asupra degetului mare poate fi crescută treptat prin creșterea tensiunii curelei cu velcro. Pentru cele mai bune rezultate, această forță de tracțiune trebuie aleasă astfel încât corecția deformării articulației să fie vizibilă. Durerea ușoară în articulația degetului mare demonstrează eficiența dispozitivului, dar forța de tragere nu trebuie să fie atât de puternică încât să perturbe somnul.

Atenție: dacă există vătămări ale degetului mare, acesta trebuie protejat cu un bandaj steril. Nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact direct cu partea vătămată.

	<p>MediaShop GmbH RO: 32948394 OP 2 Oradea, CP 2 Jud Bihor, Cod poștal 410670 Telefon 318.114.000 informatii@mediashop.tv</p>
---	---