


Seringă pentru îndepărtarea cerumenului

Nr. articol: 013930

Curățarea urechilor este ușoară și nedureroasă

Îndepărtarea eficientă a cerumenului. Poate fi utilizată cu apă caldă și picături pentru urechi. Această seringă moale, cu vârf conic, este extrem de eficientă în îndepărtarea cerumenului și a altor murdării din urechi. Poate fi utilizată atât cu apă caldă, cât și cu picături pentru urechi.

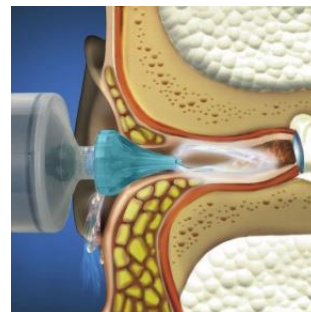

Din motive de igienă și pentru a asigura cea mai lungă durată de viață posibilă a produsului, se recomandă păstrarea acestuia în ambalajul său după utilizare.

PĂRȚI COMPONENTE

1. Deschidere pentru capul din silicon
2. Piston
3. Cap din silicon
4. Funcționare/mod de operare/utilizare

Acest curățător pentru urechi în formă de seringă este ideal pentru curățarea igienică, practică și comodă a canalelor urechii. Nu există riscul ca ceara să se adâncească în interiorul canalului urechii. **Duza** cu trei direcții curăță pereții canalului urechii fără a viza timpanul, permițând depozitelor, ceară și fluidului să se scurgă cu ușurință.

ATENȚIE:

- Seringa se curăță înainte și după fiecare utilizare
- Nu se folosește la copii sub 3 ani
- În caz de durere sau disconfort, opriți imediat utilizarea
- Nu utilizați seringă pentru curățat urechi dacă timpanul este rănit, dacă există sângerări sau blocaje în canalul urechii sau dacă există durere în ureche
- Dacă apare iritarea pielii, întrerupeți utilizarea și consultați un ORL-ist sau un dermatolog

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Așezați capul de silicon pe deschiderea seringii, astfel încât să fie fixat în siguranță.
2. Împingeți pistonul până la capăt în seringă
3. Țineți capul de silicon într-un vas cu apă caldă (de preferință la temperatura corpului) și scoateți pistonul pentru a umple seringă. Împingeți încet pistonul în seringă.

4. Așezați-vă și înclinați capul lateral în jos, în partea în care doriți să vă curățați urechile.
Puneți un castron sub ureche pentru a prinde excesul de apă.
5. Dacă este necesar, repetați acest proces de mai multe ori,

CURĂȚAREA

- După fiecare utilizare, spălați seringă pentru curățat urechi cu apă caldă cu săpun, clătiți cu apă caldă și lăsați să se usuce
- Păstrați produsul într-un loc răcoros și uscat.

CONȚINUT COLET

1 x Seringă pentru îndepărtarea cerumenului

3 x Cap din silicon.

DATE TEHNICE

Material: Material plastic

Capacitate 20 ml



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv