

3654

Návod na použitie

Vážení zákazník

Vaše nové sprchové kreslo ponúka špeciálnu funkčnosť a pohodlie. Ľahko a pohodlne sa osprchujete.

Prečítajte si túto príručku o štruktúre a použití. Tento návod si uschovajte pre budúce použitie. Ak zasielate produkt ďalej, uveďte tiež tohto sprievodcu. Výrobca a dovozca nie sú zodpovední za nesprávne použitie výrobku alebo nedodržanie pokynov v návode na obsluhu.

Účel použitia




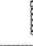




Táto stolička slúži ako sedací nábytok pre ľudí so zníženou pohyblivosťou pri sprchovaní. Na vnútorné, súkromné použitie, nie na priemyselné použitie.

Bezpečnostné informácie

- Balenie uchovávajte mimo dosahu detí (riziko zadusenía).
- Nedovoľte deťom, aby sa s stoličkou hrali alebo na ňu stúpali, aby nedošlo k pádu.
- Nezabudnite pomôcť používateľovi pri sedení alebo vstávaní.
- Nenoste ľudí, ktorí sedia na stoličke a držia sa za rukoväť.
- Výrobok sa môže rozbiť a spôsobiť zranenie.
- Nosnosť: max. 150 kg.
- Pred použitím skontrolujte, či je stolička stabilná. Uistite sa, že v sprchovej kabíne a pred ňou je protišmyková podložka, aby nedošlo k zraneniu.
- Každý mesiac kontrolujte stabilitu stoličky a správne namontované skrutky a spojenia. V prípade potreby dotiahnite skrutky.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky.
- Výrobok neupravujte ani neopravujte. Náhradné diely nakupujte iba u špecializovaného predajcu.
- Nie sme zodpovední za akékoľvek poškodenie sprchovej vaničky.
- Sadnite si vzpriamene na stoličku, nestojte. (riziko zranenia).

- Plastové prvky si zachovávajú svoju kvalitu až 5 rokov.
- Nepoužívajte výrobok, ak sú na ňom viditeľné alebo predpokladané chyby.

Zoznam náhradných dielov a obsah balenia

1 x A	1 x B	1 x C	4 x D
			
sedacia časť	Alu-rám	Alu-rám	Teleskopická noha
4 x E	5 x F	4 x G	1 x H
			
guma	podložka	okrúhly šrób (M6 x 35 mm)	okrúhly šrób (M6 x 40 mm)

Štruktúra



1. obr



2. obr


gumové nožičky (E) položte na 4 teleskopické nožičky (D), pozri obrázok 1.

Pripojte teleskopické nohy k dvom hliníkovým rámom (B) + (C), pozri obrázok 2.

Hliníkové rámy (B) + (C) zaistíte skrutkami (G) + (H) a jednu podložku (F) až po sedlo (A), pozri obrázok 3.

technické údaje

Miery :	540 x 470 x 370 - 550 mm
Sedacia časť:	475 x 300 mm
Nataviteľná výška:	350 - 520 mm
Váha:	1800 g
Nosnosť:	150 kg

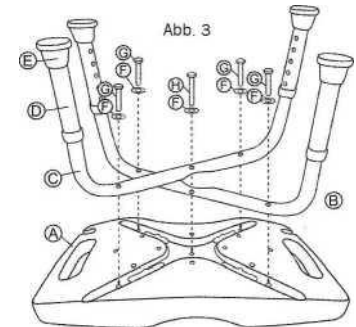

Zatlačte koniec teleskopickkej nohy (D) dovnútra a nastavte nohu do požadovanej výšky. Potom zacvaknite zaistovaciu hlavu do príslušného otvoru.



4. obr

Nastavte všetky nohy do tejto výšky, aby sa stolička nenakláňala. Kvôli zvýšenej stabilite otočte gumové nožičky (E) tak, aby sa prilepili k sprchovej vaničke, pozri obrázok 4..

Likvidace

Obalový materiál musí byť odborně předán společnosti na zpracování odpadu nebo zařízení na zpracování komunálního odpadu a může být zlikvidován jako tříděný odpad v souladu s platnými předpisy. V případě pochybností se obraťte na místní úřad pro životní prostředí.