

25819 - Fülzsíreltávolító fecskendő

„STRIEKAČKA” NA ODSTRÁNENIE UŠNÉHO MAZU, ČÍSLO MATERIÁLU 013930

Z hygienických dôvodov a pre zabezpečenie čo najdlhšej životnosti prístroja sa odporúča skladovať v balení.

1 Otvor pre silikónovú hlavicu 2 Piest 3 Silikónová hlavica 4
Používanie

Tento čistič uší s tvarom striekačky je ideálny k hygienickému, praktickému a pohodlnému čisteniu zvukovodov.

Neexistuje riziko toho, aby sa ušný maz dostal hlbšie do zvukovodu. Trojstranná dýza v uchu smeruje na bočné steny zvukovodu a nie priamo na bubienok. Takto sa usadeniny, maz a tekutina môže jednoducho vytiecť. K bezbolestnému a bezpečnému čisteniu uší detí a dospelých!

Kapacita 20 ml. Dodávanie s 3 silikónovými hlavicami.

POZOR:

- Čistič uší očistite pred a po každom použití.
- Nie je vhodný na používanie v prípade detí mladších ako 3 roky.
- V prípade bolesti alebo nepríjemného pocitu ihneď prerušte používanie.
- Nepoužívajte čistič uší, ak je bubienok zranený, ak je v zvukovodu krvácanie alebo zanesenie, alebo ak máte bolesti ucha.
- V prípade kožného podráždenia ihneď prerušte používanie a obráťte sa na ušného alebo kožného lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Silikónovú hlavicu nasadte na otvor striekačky tak, aby bezpečne zapadla na miesto.
2. Zatláčajte piest do striekačky na doraz.
3. Vložte silikónovú hlavicu do misky s teplou vodou (podľa možnosti telesnej teploty), a k naplneniu striekačky vytiahnite piest.
4. Sadnite si a hlavu nakloňte do strany na tej strane, ktoré ucho mienite vyčistiť. Pridržte misku pod ucho, aby ste zachytili prebytočnú vodu. Piest pomaly vtlačte do otvoru.
5. Postup zopakujte podľa potreby viackrát.

ČISTENIE:

- Po každom použití čističa ucha ho umyte v teplej mydlovej vode, opláchnite ho teplou vodou a nechajte úplne vyschnúť.
- Výrobok uchovávajte na suchom a chladnom mieste.

